

ACTI-BONE®

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

СТЕРИЛЕН РАЗТВОР

(за дентална употреба).



BG

Индикации

Хирургическо поставяне на импланти:

а) като спомагателно лечение при регенерация на костни дефекти на околоимплантатния алвеоларен гребен в комбинация с костни заместители и резорбируеми мембрани.

б) защита на повърхността на импланта, имплантната лежа и шевовете.

Лечение на пери-имплантит:

Като спомагателно лечение при процесите на костна регенерация също вкл. заедно с костни заместители и с резорбируеми мембрани.

След екстракции:

Като спомагателно лечение при костна регенерация на алвеолата и предотвратяване на алвеолит след екстракция.

Инструкции за употреба

Аспирирайте желаното количество разтвор от флакона със стерилна спринцовка.

Хирургическо поставяне на импланти:

а) като помощно лечение за регенерация на пери-имплантни костни дефекти, смесете продукта с костни частици до получаване на хомогенна смес, отстранете излишния разтвор със стерилна марля, след което нанесете продукта в костния дефект, като го моделирате със специален стерилен инструмент.

б) за да защитите импланта и имплантната лежа, нанесете филмообразуващия разтвор, като огънете иглата на спринцовката, за да имитирате пародонтална сонда. Поставете върха на иглата близо до основата на имплантната лежа и инжектирайте продукта, докато разтворът излезе от горния ръб. Издърпайте иглата от мястото. Нанесете няколко капки от продукта върху импланта непосредствено преди поставяне в мястото и се уверете, че цялата повърхност е мокра.

Лечение на пери-имплантит:

Смесете продукта с костни частици, докато се получи хомогенна смес, отстранете излишния разтвор със стерилна марля, след което нанесете продукта в костния дефект, като го моделирате със специален стерилен инструмент.

След екстракции:

(по-специално при отложено поставяне на импланти)

Смесете продукта с костни частици, докато се получи хомогенна смес, отстранете излишния разтвор със стерилна марля, след което нанесете продукта в алвеолата, като го моделирате със специален стерилен инструмент.

Изхвърлете спринцовката след употреба.

Съдържание на опаковката

1 бр. флакон с многократна доза от 5 ml стерилен разтвор.

5 бр. стерилни спринцовки от 2,5 ml за еднократна употреба (Artsana CE 0373).

Състав

Натриев хиалуронат, монобазен калиев фосфат, дибазен натриев фосфат, вода за инжекции.

Предупреждения

- Медицинско изделие само за употреба от стоматолог;
- Стерилен продукт;
- Бутилка с няколко дози за поне 5 приложения;
- Не използвайте повторно иглите и спринцовката: изхвърлете ги веднага след употреба;
- Не е предназначен за инжектиране;
- Съхранявайте далеч от източници на топлина и на място, недостъпно за деца;
- Не използвайте след изтичане на срока на годност;
- Съхранявайте при температура до 25 °C;
- Неизползваният разтвор, ако се съхранява в хладилник при температура 4°, запазва ефикасността си за 5 седмици.

Легенда за използваните символи

	ПАРТИДЕН НОМЕР
	МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ
	СРОК НА ГОДНОСТ
	ТЕМПЕРАТУРНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
	ТЕМПЕРАТУРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ МАКС. 25°C
	ПАЗЕТЕ ОТ ДИРЕКТНА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
	ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА