

ACTI-BONE®

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (Για οδοντιατρική χρήση).



ΕΛ

Ενδείξεις

Εμφυτευτική χειρουργική:

α) ως επικουρική θεραπεία στην αναγέννηση οστικών ελαττωμάτων της περιεμφυτευματικής κυψελιδικής ράχης σε συνδυασμό με υποκατάστατα οστών και απορροφήσιμες μεμβράνες.

β) προστασία του εμφυτεύματος, της τοποθεσίας εμφυτεύματος και των ραμμάτων.

Θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας:

ως επικουρική θεραπεία σε διαδικασίες οστικής αναγέννησης επίσης σε συνδυασμό με υποκατάστατα οστών και με απορροφήσιμες μεμβράνες.

Εξαγωγική χειρουργική:

ως επικουρική θεραπεία στην οστική αναγέννηση του κόγχου και πρόληψη των υποδοχών μετά την εξαγωγή.

Τρόπος χρήσης

Αναρροφήστε την επιθυμητή ποσότητα διαλύματος από το φιαλίδιο με την αποστειρωμένη σύριγγα.

Εμφυτευτική χειρουργική:

α) ως επικουρική θεραπεία για την αναγέννηση των περιεμφυτευτικών οστικών ελαττωμάτων, ανακατέψτε το προϊόν με το σωματίδιο του οστού έως όπου ληφθεί ένα ομοιογενές μείγμα, αφαιρώντας την περίσσεια του διαλύματος με αποστειρωμένη γάζα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν στο ελάττωμα των οστών διαμορφώνοντάς το με ένα κατάλληλο αποστειρωμένο όργανο.

β) για την προστασία του εμφυτεύματος και της θέσης εμφύτευσης, εφαρμόστε το διάλυμα που σχηματίζει φιλμ λυγίζοντας τη βελόνα για να μιμηθεί έναν περιοδοντικό καθετήρα.

Τοποθετήστε το άκρο της βελόνας κοντά στη βάση της θέσης εμφύτευσης και εγχύστε το προϊόν μέχρι το διάλυμα να βγει από το άνω περιθώριο.

Βγάλετε τη βελόνα από το σημείο. Ρίξτε μερικές σταγόνες του προϊόντος πάνω στο εμφύτευμα αμέσως πριν το τοποθετήσετε στο σημείο, έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνεια να είναι υγρή.

Θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας:

ανακατέψτε το προϊόν με το σωματίδιο του οστού έως όπου ληφθεί ένα ομοιογενές μείγμα, αφαιρώντας την περίσσεια του διαλύματος με αποστειρωμένη γάζα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν στο ελάττωμα των οστών διαμορφώνοντάς το με ένα κατάλληλο αποστειρωμένο όργανο.

Εξαγωγική χειρουργική

(ιδιαίτερα για καθυστερημένη τοποθέτηση εμφυτευμάτων):

ανακατέψτε το προϊόν με το σωματίδιο του οστού έως όπου ληφθεί ένα ομοιογενές μείγμα, αφαιρώντας την περίσσεια του διαλύματος με αποστειρωμένη γάζα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν στην κοιλότητα διαμορφώνοντάς το με κατάλληλο αποστειρωμένο όργανο.

Πετάξτε τη σύριγγα μετά τη χρήση.

Περιεχόμενο της συσκευασίας

1 φιάλη πολλαπλών δόσεων 5 ml αποστειρωμένου διαλύματος.

5 αποστειρωμένες σύριγγες μιας χρήσης των 2,5 ml (Artsana CE 0373).

Σύνθεση

Υαλουρονικό νάτριο, μονοβασικό φωσφορικό κάλιο, διβασικό φωσφορικό νάτριο, ύδωρ για ενέσιμα.

Προειδοποιήσεις

- Ιατρική συσκευή για αποκλειστική χρήση του οδοντιάτρου,
- Αποστειρωμένο προϊόν,
- Φιάλη πολλαπλών δόσεων για τουλάχιστον 5 εφαρμογές,
- Μην επαναχρησιμοποιείτε τη σύριγγα: πετάξτε την αμέσως μετά τη χρήση,
- Μη ενέσιμο,
- Μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από παιδιά,
- Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης,
- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C,
- Το αχρησιμοποίητο διάλυμα, εάν διατηρείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4°, διατηρεί την αποτελεσματικότητά του για 5 εβδομάδες.

Πίνακας συμβόλων

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
	ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ +25°C
	ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΞΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ