

GA

Sprioc úsáidí

Tá na scannáin SHELTER® beartaithe a bheith úsáidte le linn máinliacht bhéil-mascailleach-ghnúiseach, ionphlandeolaíocht, pearadointeolaíocht, máinliacht bhéil agus ionódóntaice, chun a bheith mar thaca ag athghiniúint treoraithe cnámha agus fíocháin, chun ionchlannáin a chosaint agus chun athghiniúint a dhéanamh ar fíocháin pearódóntach.

Faightear iad ó eallach rialaithe ag an tSeirbhís Tréidliachta, déantar iad a ionú, a dibhealú, a liófilíú agus a steiriliú go mionchúiseach trí chóireáil radaíocht ianaithe. Ós rud é go bhfuil leibhéil íseal antaigineach agus árd-leibhéil bith-chomhoiriúnacht acu, is féidir iad a úsáid go sábháilte agus go héasca i bhfeidhmeanna máinliachta bhéil-mascailleach-ghnúiseach, ionphlandeolaíocht, pearadointeolaíocht, máinliacht bhéil agus ionódóntaice.

Déantar na scannáin a chomhtháthú leis an bhfíochán bog mórtimpeall. Braitheann an t-aga chun claochlú ar chríochnú ar athróa anatamaíocha (ceangail idir dromchla beathchnámh agus toirt den láithreán nódaithe) chomh maith le tosca aonaire atá athraitheach ó othair go hothair. Oibríonn siad mar bhac nuair a chuirtear iad idir an t-ábhair nádúrúil cnáimhe agus an bhfíochán bog. Cruthaíonn an scannán scafall bitheolaíoch a bhíonn ionadaithe ag fíochán tacaíochta nua-chumtha.

Is féidir na scannáin SHELTER® F agus SHELTER® S a idirhealú mar gheall ar aga athionsúcháin an fheiste: ag brath ar an bhfeidhm chliniciúil den scannán, is féidir rogha a dhéanamh idir scannán athionsúite go tapa (SHELTER® F, 4 sheachtain) agus scannán athionsúite go mall (SHELTER® S, 3-6 mhí).

Rogha

Feiste	Ainm Tráchtála	Cód	Toisí
Scannán déanta as peireacairdiam le bunús buaibheach	SHELTER® F (ath-insúchán tapa)	BMFpshelter04A	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,2 mm
		BMFpshelter04B	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,2 mm
		BMFpshelter04C	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,2 mm
		BMFpshelter04D	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,4 mm
		BMFpshelter04E	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,4 mm
		BMFpshelter04F	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,4 mm
		BMFpshelter04G	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,8 mm
		BMFpshelter04H	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,8 mm
		BMFpshelter04I	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,8 mm
		BMFpshelter04J	Scannán pheireacairdiam 15x20x1 mm
		BMFpshelter04K	Scannán pheireacairdiam 30x25x1 mm
		BMFpshelter04L	Scannán pheireacairdiam 50x30x1 mm
	SHELTER® S (ath-insúchán mall)	BMSpshelter05A	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,2 mm
		BMSpshelter05B	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,2 mm
		BMSpshelter05C	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,2 mm
		BMSpshelter05D	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,4 mm
		BMSpshelter05E	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,4 mm
		BMSpshelter05F	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,4 mm
		BMSpshelter05G	Scannán pheireacairdiam 15x20x0,8 mm
		BMSpshelter05H	Scannán pheireacairdiam 30x25x0,8 mm
		BMSpshelter05I	Scannán pheireacairdiam 50x30x0,8 mm
		BMSpshelter05J	Scannán pheireacairdiam 15x20x1 mm
		BMSpshelter05K	Scannán pheireacairdiam 30x25x1 mm
		BMSpshelter05L	Scannán pheireacairdiam 50x30x1 mm

Tásca teiripeacha

Is féidir na scannáin SHELTER® a úsáid ina aonair nó in éineacht leis an t-ionadaí cnáimhe REBONE® i rith ghnáthaimh máinliachta pearódóntaice agus/nó fiacra, ar nós:

- cúram ailbheolais agus cirín
- máinliacht cuais le rochtain ón taobh agus ón chuirín
- ardú chothrománach in éalang le 2 bhalla
- ardú ingearach in éalang le 2 bhalla
- oscailt agus pollta i ngearrthacha peir-ionphlandacha
- athghiniúint pearódóntach i ngrapadh drandail agus in éalang idirchnámhacha le 2 bhalla

Teoracha úsáide

Ná húsáidtear SHELTER® ag aon duine eile ach dochtúirí a bhfuil oiliúint phroifisiúnta feiliúnach acu agus dá bhrí sin ag saineolaithe i dteicnicí athghiniúint treoraithe cnámha agus fíocháin.

Ní mór cloí le na prionsabail ghinearálta ó thaobh steiriliúocht agus cógas an othair le linn an bhforchuir.

Déan láthair an ionphlandú a ullmhú mar is cóir, ag fáil réidh le hiarmhair de fíocháin snáithíneach agus más gá poll an fíocháin faighteora chun cuidiú leis an chéim tosaigh den athghiniúint.

Is féidir an táirge a hiodráitiú le sailíne fhíseolaíoch nó le APG® (Pláitíní Glóthacha Uathlóga) ar féidir iad a fháil in éineacht leis na táirgí sa réimse GFONE®.

- Déan an éalang a thomhais le tóireadóirí pearódóntach.
- Gearr an scannán tirim le siosúr steiriúil chun an cruth agus an méid ceart a dhéanamh.
- Cuir an taobh garbh den scannán ar an éalang.

- Fliuch an scannán san áit atá sé leis an bhfuil ón éalang.
- Chun an cnámhchuas a scaradh amach ó fíocháin an drandail agus a dhóthain tacaíocht a thabhairt don athghiniúint, caithfidh an scannán teorainn an éalang a shárú de 2 mm ar a laghad.
- Clúdaigh an éalang cnámha leis an scannán, brú go measartha é nó go stopfadh an fuil ag rith.
- Is féidir uamanna a chuir sa scannán nó é a bheith feistithe le tacóidí, ach go hiondúil níl aon ghá leis seo mar go bhfuil sé fíor-hidrifíleach agus greamaíonn sé go maith. Moltar na huamanna a chur isteach 2-3 mm ón ionchlannán más féidir.
- Tá sé tábhachtach cinntiú go ndúntar an chréacht gan teannas agus nach bhfuil aon seile ligthe isteach.
- Caithfidh an t-othar cloí leis na treoracha leagtha amach ag an máinlia i gcomhair sláinteachas béil cheart.

Fritásca, rabhaidh

Tá sé éigeantach go raibh an dochtúir cinnte de chás chliniciúil ghinearálta agus logánta an othair, agus measúnú a dhéanamh ar an bhfuil fritásca nó nach bhfuil chun an cóiriú a thabhairt. Ó thaobh sláinte ghinearálta de, caithfear measúnú an bhfuil na riochtaí sláinte seo a leanas ann: cliceadh cardashoithíoch agus/nó riospráide, siadaí, diaibéiteas díchúitithe, agus araile. Tá sé tábhachtach measúnú logánta a dhéanamh chomh maith.

Ná húsáid na scannáin SHELTER® sna hothair a bhfuil:

- géarinfhabhtuithe sa bhéalchuas nó athlasadh ghéar nó ainsealach orthu i láthair an t-ionchlannáin.
- galair shistéamacha nár ceadaitear obráidí bhéil-mascailleach-ghnúiseach, ionphlandeolaíocht, pearadointeolaíocht, ionódóntaice nó obráidí mháinliachta béil eile dóibh orthu
- hipiríogaireacht aitheanta i leith scannáin le bunús buaibheach orthu.

Ná húsáid na scannáin i bhfeidhmeanna cliniciúla sa néaramháinliacht agus oftalmíolaíocht: níl sé beartaithe go dtiocfaidh an táirge seo i dteagmháil le lárchóras na néaróg nó le súile an othair.

Níl staidéar déanta maidir le fhorchuir scannáin le bunús buaibheach le linn toirchis agus beathú cíche, nó ar an tionchar atá aige ar atáirgeadh daonna. Sula nódáíonn sé na scannáin SHELTER® tá dualgas ar an bhfiacloir mar sin measúnú ar leith a dhéanamh de na buntáistí don mháthair agus na contúirtí a d'fhéadfadh a bheith in ann don pháiste.

Níl sonraí ar fáil a chuirfeadh in iúl go bhfuil gá céimeanna áirithe réamhchúramacha a thógáil mar gheall ar aois an othair.

Fothorthaí

- I bhfíor-chorrchás d'fhéadfadh frithghníomhaithe ailléirgeacha nó éadulaingt ar na scannáin le bunús buaibheach a tharlú.
- I bhfíor-chorrchás d'fhéadfadh frithghníomhaithe fíocháin athlastacha a tharlú.
- Mar atá fíor le haon ábhar coimhthíoch, d'fhéadfadh ionfhabhtuithe phoitéinsíúla logánta a bhí ann cheana imeacht in olcas mar gheall ar nádúrúil na scannáin.
- D'fhéadfadh cúrsaí dul in aimhréidh ghinearálta fiú amháin i rith na hobráide, mar shampla d'fhéadfadh an drandal crapadh, an drandal a chur fola go tiubh, at a theacht ar an bhfíochán bog, mothálacht i leith an tsolais, scamhadh eipitéilíam an drandail gar don liopóg, athionsúchán nó ancalóis den fréamh cóireáilte, beagán cailliúint ar aide chuirín na chnámhe, ionfhabhtuithe, pianta nó aimhréidheanna a bhfuil baint acu le ainéistéitice.

Idirghníomhú le táirgí agus modhanna eile

- D'fhéadfadh éifeachtúlacht na scannáin SHELTER® laghdú de bharr coscairí chomhbhaillíúcháin agus cógais antaithéachtacha, toisc go bhfuil seans ann go bhféadfadh na táirgí seo tionchar a imirt ar fhuilteachtadh.
- Níl aon idirghníomhú aitheanta san athshondais mhaighnéadaigh agus, nuair a áirítear comhshuíomh bhithcheimiceach na scannáin, níl na hidirghníomhaithe sin intuartha.

Rabhaidh, céimeanna réamhchúramacha

- Tá na scannáin SHELTER® beartaithe a bheith úsáidte le haghaidh na feidhmeanna thuasluaite amháin.
- Níor tástáladh na feistí i dtéarmaí cliniciúla ar othair a bhfuil éalang mháinliach, ionphlandeolaíochta, ionódóntacha nó pearódóntacha an-thromchúiseach orthu.
- Is é an bhfiacloir atá freagrach as na h-othair a chur ar an eolas mar gheall ar na fritásca agus fothorthaí féideartha, agus na céimeanna réamhchúramacha atá ag teastáil. Má tharlaíonn tinneas iarobráide, mar shampla pianta, ionfhabhtuithe nó siomptóim neamhghnácha eile, caithfidh an t-othar comhairle a fháil ón bhfiacloir láithreach.
 - Caithfear na hothair ar a bhfuil droch-ghalar shistéamacha (m. sh. diabetes mellitus nach bhfuil rialaithe go cuí, droch-hipirtheannas, droch-ghalar oclúideach artaireach forimeallach, siadaí urchóideacha nó galair uath-imdhíonachta) nó na hothair sin a bhfuil orthu, mar shampla, dul faoi cóiriú fad-tearmach le stéaróideach nó faoi theiripe antaithéachtach, a bhainistiú go mionchúramach, mar a dhéantar i ngach ghnáthamh máinliachta.
 - Caithfear tuairisciú a dhéanamh ar aon eachtra thromchúiseach a tharlaíonn atá baint aige leis an bhfeiste leighis curtha ar fáil againne go dtí an déantóir agus go dtí na húdaráis inniúla sa mballstát ina bhfuil sé suite.

Eochair eolais

	SAINAITHINT UATHACH NA GLÉAS
	CÓDUIMHIR THÁIRGE
	UIMHIR OIRD
	FEISTE LEIGHIS
	DÁTA DÉANTÚSAÍOCHTA
	DÁTA ÉAGA
	STEIRIÚIL GÁMA-GHA
	TEOCHT STÓRÁLA 5°C - 30°C
	STÓRÁIL IN ÁIT TIRIM
	COSAIN Ó SHOLAS NA GRÉINE
	LÉIGH NA TREORACHA ÚSÁIDE AR FÁIL AG AN NASC: https://www.ubgen.com/client/area-download.html
	NÁ HÚSÁIDTEAR I GCÁS PACÁISTE DAMÁISTITHE
	AON UAIRE
	NÁ HATHSTEIRILÍTEAR