

ACTI-BONE®

STERILNÍ ROZTOK KYSELINY HYALURONOVÉ

(pro stomatologické použití).



CZ

INDIKACE

Chirurgie implantátů

a) Jako pomocná léčba při regeneraci kostních defektů peri-implantátového alveolárního hřebene ve spojení s kostními náhradami a resorbovatelnými membránami.

b) Ochrana povrchu implantátů, místa implantátu a stehů.

Ošetření periimplantitidy

Jako pomocná léčba při procesech kostní regenerace také ve spojení s kostními náhradami a s resorbovatelnými membránami.

Extrakční chirurgie

Jako pomocná léčba při kostní regeneraci alveolu a prevenci postextrakční alveolitidy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí sterilní injekční stříkačky nasajte požadované množství roztoku z lahvičky.

Chirurgie implantátů

a) Jako pomocná léčba při regeneraci periimplantátových kostních defektů, smíchejte přípravek s kostními částicemi, abyste získali hladkou pastu, přebytečný tekutý gel odstraňte sterilní gázou, poté přípravek aplikujte do kostního defektu a vymodelujte jej sterilním nástrojem.

b) k ochraně implantátu a jeho okolí aplikujte tekutý gel, ohněte jehlu tupým hrotem tak, aby napodobovala parodontální sondu. Přiložte tupý hrot jehly k základně oblasti implantátu a vstříkujte přípravek, dokud z horního okraje nevyteče tekutý gel. Odstraňte jehlu z oblasti. Bezprostředně před zavedením do oblasti implantátu. Naneste několik kapek přípravku přímo na implantát tak, aby byl celý povrch implantátu vlhký.

Ošetření periimplantitidy:

Smíchejte přípravek s kostními částicemi, abyste získali hladkou pastu, přebytečný tekutý gel odstraňte sterilní gázou, poté přípravek aplikujte do kostního defektu a vymodelujte jej sterilním nástrojem.

Ekstraktivní chirurgie

Zejména pro pozdější umístění implantátu smíchejte přípravek s kostními částicemi, abyste získali hladkou pastu, přebytečný tekutý gel odstraňte sterilní gázou, poté přípravek aplikujte do kostního defektu a vymodelujte jej speciálním sterilním nástrojem.

OBSAH BALENÍ

1 jednotka vícedávkové lahvičky 5 ml sterilního roztoku.

5 jednotek sterilních jednorázových injekčních stříkaček 2,5 ml.

SLOŽENÍ

Hyaluronát sodný, monobazický fosforečnan draselný, dibazický fosforečnan sodný, voda na injekce.

VAROVÁNÍ

- Zdravotnický prostředek pouze pro profesionální použití,
- Sterilní výrobek,
- Vícedávková lahvička pro nejméně 5 aplikací,
- Jehly a stříkačky nepoužívejte opakovaně: po použití je ihned zlikvidujte,

- Není určen k injekčnímu použití,
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí,
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
- Skladujte při teplotě do 25 °C,
- Nepoužitý tekutý gel lze uchovávat v lahvičce, chráněný před světlem a v chladničce při teplotě 2-4 °C po dobu až 5 týdnů.

Legenda symbolů

	ČÍSLO ŠARŽE
	ZDRAVOTNÍ PŘÍSTROJ
	DATUM EXPIRACE
	TEPELNÁ STERILIZACE
	SKLADOVACÍ TEPLOTA +25 °C
	SKLADUJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ
	PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ